

Compri-Heal®

Das Besondere Kompressionssystem



- Anti-Rutsch-Effekt
- Einfache Handhabung
- Kein zusätzliches Fixiermaterial
- Optimale Druckverteilung
- Latexfrei
- Von Hand abreißbar
- Einmalprodukt
- Erstattungsfähig

Compri-Heal® ist ein Kompressionsverband, der als perfekte Unterstützung zu Wundbehandlung dient und auch dem aktiven Patienten eine hohe Lebensqualität bietet.



Compri-Heal®

2 Komponenten-Kompressionssystem
10cm x 6,5 m | 10cm x 8,2 m gedehnt
1 Set besteht aus 2 Binden
Für Knöchelumfang 18-25 cm geeignet
PZN 12143265

Haben Sie noch Fragen zu Compri-Heal® oder möchten gerne mehr Informationen oder eine Produktschulung?

**Rufen Sie uns an –
wir sind gerne für Sie da.**



Bamboo Health Care GmbH
Reutener Str. 5
D-79279 Vörstetten

Tel. (07666) 942 90 50
Fax (07666) 942 90 51


mail@bamboo-health-care.com
www.bamboo-health-care.com



Compri-Heal®

2 Komponenten-Kompressionssystem



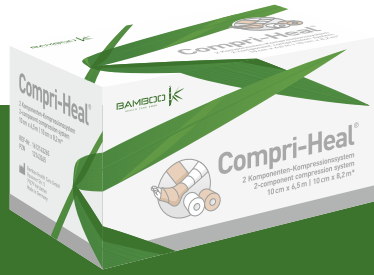

Compri-Heal®

Kompressionssystem

- **Kombination** aus **Kurzzug-** (Polsterbinde) und **Langzugbinde** (Kompressionsbinde) für **optimalen Druckaufbau**
- Ruhedruck → 35mm Hg
- Arbeitsdruck → 50mm Hg
- Kann durch die gute Polsterung bis zu **7 Tage** getragen werden
- **Hohe Luftdurchlässigkeit** bietet heilungsfördernde Wirkung
- Durch die Beschichtungen der Kompressionsbinden wird eine sichere Lagenhaftung aufeinander erreicht, so dass ein **Anti-Rutsch-Effekt** entsteht.

Indikationen

- Venöse Ulcera
- Chronische Venen Insuffizienz mit und ohne Ulcus cruris
- Tiefe Venenthrombose



Compri-Heal®

1. Beschichtete Posterbinde

Der erste Teil von **Compri-Heal®** ist die einseitig beschichtete, elastische weiße Vliesbinde.

Ihre vorrangige Aufgabe ist die gleichmäßige **Kompressionsverteilung** der äußeren Lage auf das Bein. Somit ist einerseits der erforderliche Druck sichergestellt, während gleichzeitig Einschnürungen durch die Überlappung der Lagen vermieden werden.

Zusätzlich dient Sie als **Polsterung**. So wird keine zusätzliche Watte benötigt.

Sie verfügt über eine **Dehnungsbegrenzung**, so dass die Rückstellkraft vermindert wird und die Anwendung sicher macht, auch für etwas ungeübtere Anwender.

Die Binde lässt sich problemlos durch „abreißen“ kürzen, ohne dass eine Schere benötigt wird.



Compri-Heal®

2. Kohäsive Kompressionsbinde

Der zweite Teil von **Compri-Heal®** ist die kohäsive, dauerelastische braune Binde.

Diese hält aufgrund ihrer Materialeigenschaften, in Kombination mit der Vliesbinde, die Kompressionswirkung über mehrere Tage.

Die **kohäsive, latexfreie Beschichtung** verhindert ein Verrutschen; die Binde haftet nur auf sich oder der Polsterbinde und nicht an Haut, Haaren und Kleidung.

Die Kohäsion sorgt auch dafür, dass **keine Clips oder Tapes zur Fixierung** der Enden benötigt werden. Auch diese Binde lässt sich von Hand reißen und bietet damit eine **einfache Anwendung**.